

# Askina<sup>®</sup> DresSil


Apósito hidrocélular con lámina de contacto  
con la herida porosa, de baja adherencia de Silicona.




## ASKINA® DresSil

### Descripción del producto

Apósito de espuma de poliuretano estéril, con lámina de contacto con la herida, porosa y de baja adherencia de Silicona.

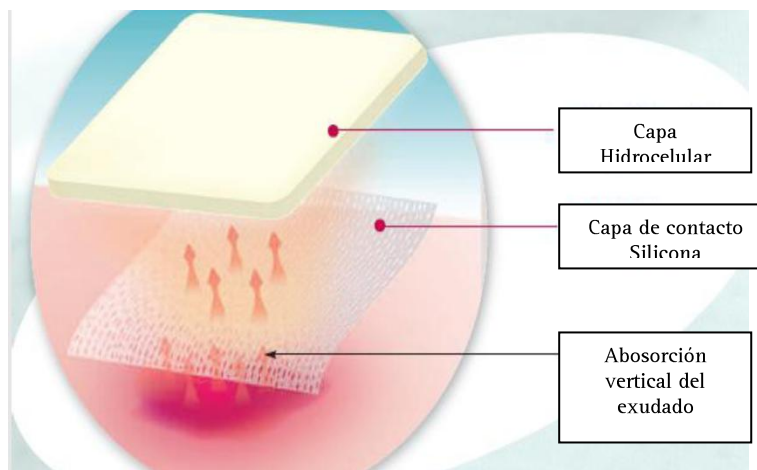

La capa de silicona suave, es de adherencia moderada garantizando la correcta colocación del apósito y minimiza el posible trauma durante el cambio de apósitos.

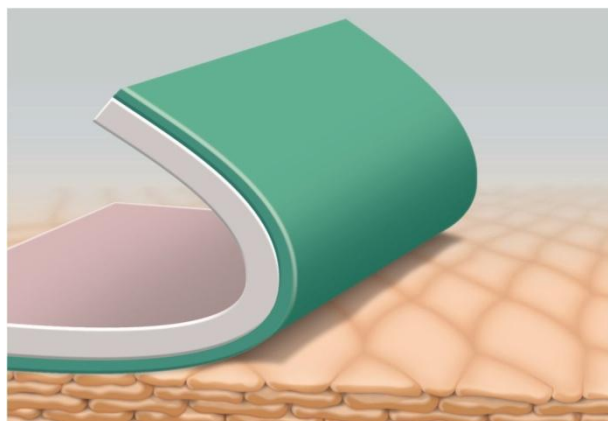

La capa externa de poliuretano evita la entrada de líquidos y otros contaminantes, permitiendo el intercambio de gases.

Indicaciones:

Askina® DresSil está indicado para el tratamiento de una amplia gama de lesiones de profundidad parcial o total, como úlceras por decúbito, úlceras arteriales y o venosas, úlceras en pies diabéticos, quemaduras de segundo grado, injertos cutáneos, zonas de extracción de órganos/injertos, lesiones postoperatorias, desgarros de la piel, laceraciones,

Indicado en la cura en ambiente húmedo de lesiones moderadamente exudativas.

## Instrucciones de Uso

Askina® DresSil es muy fácil de aplicar y no se precisan conocimientos ni equipos especiales.

Askina® DresSil puede dejarse colocado durante varios días, dependiendo de la cantidad de exudado siempre y cuando no se produzcan fugas, en cuyo caso hay que realizar el cambio de apósito.

### Preparación de la Piel:

Limpiar la lesión con una solución para limpieza y descontaminación (PHMB+Betaína) o solución salina en su defecto.

Secar la piel alrededor de la lesión.

### Aplicación del Apósito:

Seleccionar el tamaño adecuado de Askina® DresSil que cubra completamente la superficie de la lesión, asegurando un margen de 2 a 3 cm alrededor de los bordes de la lesión.

Si fuera preciso, Askina® DresSil se puede recortar al tamaño necesario antes de retirar las capas de protección. Siempre que se requiera, es posible sobreponer varios apósitos a fin de cubrir las lesiones grandes.

Retirar las capas de protección. Colocar Askina® DresSil sobre la lesión y apretar suavemente para garantizar la correcta aplicación.

Askina® DresSil puede dejarse colocado durante varios días, máximo una semana, según el estado de la lesión.

## Condiciones de conservación

Conservar en lugar fresco y seco  
Caducidad: 3 años.

## Presentaciones

Askina DresSil 10 x 10 cm  
Askina DresSil 10 x 20 cm  
Askina DresSil 15 x 15 cm  
Askina DresSil 20 x 20 cm

C/10 unidades  
C/10 unidades  
C/5 unidades  
C/5 unidades

Código Braun 5291010  
Código Braun 5291210  
Código Braun 5291510  
Código Braun 5292005



**Marca CE:0050**

**B | BRAUN**