

Hydrosorb®

Lote	Medida	Producto ofertado	Referencia
Apósito placa de hidrogel hidratante no adhesivo			
	5 x 7,5 cm	Hydrosorb 5 x 7,5	900 853
	10 x 10 cm	Hydrosorb 10 x 10	900 854
	20 x 20 cm	Hydrosorb 20 x 20	900 855
Apósito placa de hidrogel hidratante adhesivo			
	4,5 x 6,5 cm	Hydrosorb comfort 4,5 x 6,5	900 708
	7,5 x 10 cm	Hydrosorb comfort 7,5 x 10	900 704
	12,5 x 12,5 cm	Hydrosorb comfort 12,5 x 12,5	900 723
	21,5 x 24 cm	Hydrosorb comfort 21,5 x 24	900 707


1. Producto

A. Presentación del producto





Hydrosorb® es un apósito absorbente hidrocélular de hidrogel, con una capa protectora semipermeable transparente que retiene los gérmenes y que gracias a su elevado contenido de agua, del 60% aproximadamente, proporciona inmediatamente un ambiente húmedo equilibrado para la herida, favorece la granulación y la epitelización, ofrece un buen efecto acolchado, tiene una excelente biocompatibilidad y se puede retirar sin que se irrite la herida.


B. Indicaciones

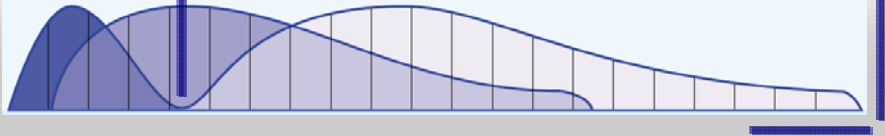Indicaciones Hydrosorb

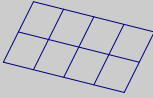

Epitelización

Tipo de Heridas	Características	Nivel de Exudación
	 Epitelización	
		Nivel de Hidratación
		

Tratamiento Específico de Heridas  ayuda a curar.

Hydrosorb® e Hydrosorb® comfort son adecuados para el tratamiento húmedo de heridas, especialmente para el tratamiento de heridas clínicamente no infectadas en fase de granulación y epitelización, en la úlcera crural o en la úlcera por decúbito, para el tratamiento de las quemaduras de segundo grado así como para favorecer la fase de reepitelización de injertos de piel de espesor parcial tras la hemostasis adecuada.

2. Composición del producto



Gel transparente en placa

- Film poliuretano transparente con retícula
- Gel de polímeros y 60% solución isotónica

A. Capa exterior

- Film poliuretano transparente con retícula

B. Capa Interior


- Gel de polímeros y 60% solución isotónica

3. Beneficios principales

Hydrosorb Modo de Acción

Hidratación continua

- Gracias a su alto contenido en agua Hydrosorb proporciona desde el primer momento y durante varios días humedad a la herida.

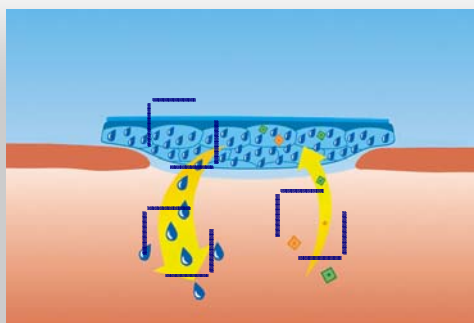

Confort y Alivio del Dolor

- El agua contenida en el gel proporciona un efecto calmante inmediato y continuo

Capacidad de Absorción

- Absorbe la exudaciones en fase de epitelización

Tratamiento Específico de Heridas

HARTMANN ayuda a curar.

A. Hidratación continua

Gracias a su alto contenido en agua Hydrosorb proporciona desde el primer momento y durante varios días humedad a la herida.

B. Confort y Alivio del Dolor

- El agua contenida en el gel proporciona un efecto calmante inmediato y continuo
- La elasticidad y suavidad del gel dotan a Hydrosorb de un excelente efecto acolchado

C. Capacidad de Absorción

- Absorbe la exudados en fase de epitelización

D. Inspección de la herida


- Transparencia permite inspeccionar herida
- Retícula permite observar evolución de la herida sin tener que retirar el apósito

4. Envasado

Hydrosorb® se envasa unitariamente en bolsas termoselladas de lámina de aluminio. Las bolsas termoselladas se envasan en estuches. Los estuches se empaquetan en cajas de transporte de cartón según normas DIN, selladas con cinta adhesiva, y éstas se empaquetan en Europallet.

5. Estudios clínicos

A. Evolución de tejidos

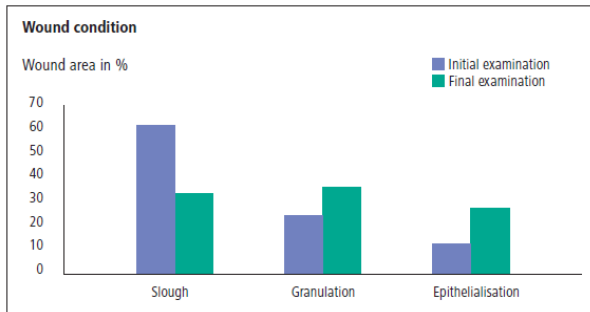


La apariencia de **exudado disminuyó** mientras que la cuota de **tejido de granulación y epitelización incrementó**

Zoellner, P.

Clinical performance of a hydrogel dressing in the management of chronic wounds – a prospective application study in 81 patients

B. Percepción de dolor

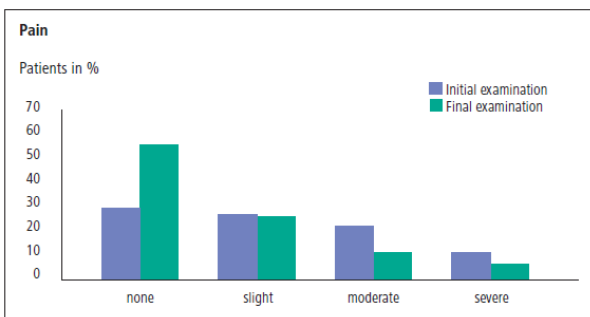

Disminuyó la apariencia de **dolor**

Zoellner, P.

Clinical performance of a hydrogel dressing in the management of chronic wounds – a prospective application study in 81 patients

Datos de contacto

Oficina de concursos y adjudicación pública
gestion.concursos@hartmann.info

Back Office

Mónica Reixach

monica.reixach@hartmann.info

Esther Laso

esther.laso@hartmann.info

Laboratorios HARTMANN S.A.

c/ Carrasco i Formiguera 48, Apartado 17
08302 Mataró

Servicio de Atención al Cliente

902 222 001

www.es.hartmann.info

Reg. Mercantil de Barcelona

Tomo 294, Folio 28, Hoja 18781

Insc. 1ª de Sociedades

N.I.F. A-08-032401