

Ficha técnica

IODOSORB POWDER, polvo de cadexómero yodado



No contiene látex

Características

- Limpia el lecho de la lesión
- Absorbe esfacelos, debris y exudado
- Efectivo ante un amplio espectro de microorganismos
- Liberación prolongada de yodo, de forma continua, manteniendo los niveles de yodo en la lesión
- Promueve la cicatrización de la lesión
- Fácil de aplicar
- Se retira fácilmente, sin dañar el epitelio neoformado
- Ayuda a eliminar el olor
- El cambio de color del polvo indica el momento en que el producto puede retirarse

Descripción

IODOSORB Powder es un polvo estéril marrón oscuro que está compuesto de cadexómero (microesferas de almidón modificado) con yodo. Las esferas de cadexómero son biodegradables. IODOSORB Powder absorbe el exceso de exudado y de esfacelos del lecho de la lesión y reduce los microorganismos sobre la superficie de la lesión. Al hacer esto, se transforma en un gel blando y húmedo.

Indicaciones

IODOSORB Powder está indicado para el tratamiento tópico de lesiones que exudan crónicamente. IODOSORB Powder puede utilizarse debajo de una terapia de compresión. IODOSORB Powder puede utilizarse en úlceras infectadas. Cuando el producto se utiliza en úlceras infectadas la infección debe ser inspeccionada y tratada según el protocolo clínico local.

Instrucciones de uso

1. Lavarse las manos bien antes y después del uso. Utilizando guantes, limpiar la lesión y el área de alrededor con un chorro suave de agua o solución salina. NO SECAR la superficie de la lesión.
2. Aplicar IODOSORB Powder sobre la superficie de la lesión hasta formar una capa de 3 mm de profundidad, con la misma forma de la lesión. Tapar la lesión completamente con un apósito secundario apropiado. Aplicar un vendaje de compresión si fuera apropiado. Después de la aplicación debe tirarse el sobrante de IODOSORB Powder.

Una sola aplicación de IODOSORB Powder no debe superar los 50 g (equivale a 16 sobres de 3 g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 50 sobres de 3 g).

Cambios de Iodosorb Powder

1. IODOSORB Powder debe cambiarse cuando esté saturado con el exudado procedente de la lesión y haya liberado todo el yodo. Esto se indica mediante la pérdida de color, normalmente de dos a tres veces a la semana. Si la lesión exuda mucho pudiera ser necesario realizar cambios diarios. Si fuera necesario, humedecer el apósito durante unos minutos y luego retirarlo.
2. Con cuidado retirar IODOSORB Powder utilizando un chorro suave de agua o solución salina.
3. Con cuidado absorber el exceso de líquido, de haberlo, dejando la superficie de la lesión ligeramente húmeda antes de volver a aplicar IODOSORB Powder.

Composición

1g de polvo contiene 991 mg de cadexómero y 9 mg de yodo.

Contraindicaciones

IODOSORB Powder no debe usarse sobre tejido necrótico seco o en pacientes con sensibilidad conocida al yodo o a cualquiera de los otros componentes.

No utilizar IODOSORB Powder en niños, mujeres embarazadas o lactantes ni en pacientes con trastornos de la glándula tiroidea o disfunción renal. (ej. Tiroiditis de Hashimoto o nódulos no tóxicos de bocio).

Advertencias

Hay riesgo posible de interacción con el litio, lo que da como resultado una posibilidad mayor de que se produzca hipotiroidismo.

NO utilizar IODOSORB Powder concomitantemente con antisépticos de mercurio o taurolidina.

Si el paciente debe realizarse pruebas tiroideas deberá informar al facultativo.

IODOSORB Powder, polvo de cadexómero yodado

Precauciones durante el uso

- El contenido del sobre sólo debe utilizarse en un paciente.
- No utilizar IODOSORB Powder cerca de los ojos, oídos, nariz o boca.
- El producto es para uso externo solamente.
- IODOSORB Powder puede ocasionar un ligero dolor (escozor, picor) pasajero la primera hora después del tratamiento. Esto significa que el polvo está comenzando a limpiar la lesión.
- Ocasionalmente, IODOSORB Powder puede hacer que la piel periwulceral se inflame o enrojezca. Esta es una condición pasajera. Si los síntomas persisten o si el paciente experimenta otros síntomas, deberá contactar con el facultativo.
- El contacto con la piel periwulceral/piel intacta debe reducirse al mínimo.
- Es posible que se forme una corteza adherente si se deja que IODOSORB Powder se seque.
- Una sola aplicación de IODOSORB Powder no debe superar los 50 g (equivale a 16 sobres de 3 g) y nunca debe aplicarse más de 150 g a la semana (equivale a 50 sobres de 3 g).
- La duración del tratamiento no debe ser superior a los 3 meses.

Caducidad

3 años

Esterilización

Esterilizado mediante radiación gamma

Almacenaje

Conservar en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C.

Clase CE

III, estéril

Fabricante

Smith & Nephew Medical Limited
P.O.Box 81 Hessle Road
Hull HU 2BN - Inglaterra

Presentación

Código de producto	Descripción	Unidades / envase	Unidad mínima de venta	Código EAN-13
66001286	Iodosorb Powder (sobres 3g)	7 sobres/caja	1 caja	5000223457662

Curación de Heridas

Smith & Nephew, S.A. Frutuós Gelabert, 2-4, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 933 373 74 53;
Tel. Atención Cliente: 93 373 73 14; 93 373 71 14; 93 373 74 14; 93 373 71 65
Fax. Atención cliente: 93 373 72 65; 93 373 76 03

EducaciónAWM@smith-nephew.com
www.smith-nephew.com

° Marca registrada de Smith & Nephew